



サーモフォーカスプロの正しい使い方をご理解いただくために、必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

以下は、サーモフォーカスプロをすぐにお使いいただくためのクイックガイドです。


1. 裏側のカバーを開け、電池を入れる。

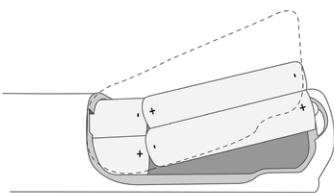


2. 「ホームボタン」を押し電源を入れる。

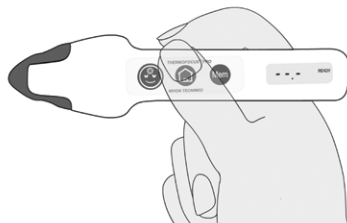


3. 校正を行うために「フェイスボタン」と「ホームボタン」を同時に押す。すると「CAL」の文字が液晶画面に表示される。

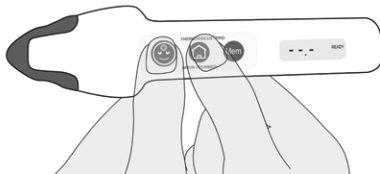


4. 10秒以内にキャップを開け、室内の壁、または机などの板面に向かって「ホームボタン」を押す。

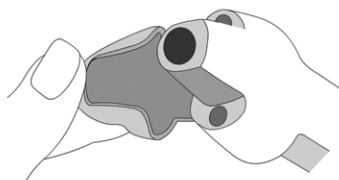

5. 焦点を合わせ「ホームボタン」から指を離す。すると、光がゆっくり点滅した後、液晶画面に室温に相当する温度が表示される。

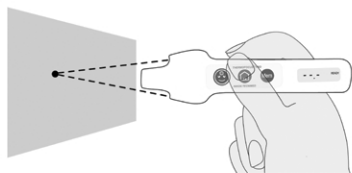


6. 体温測定の準備が完了。

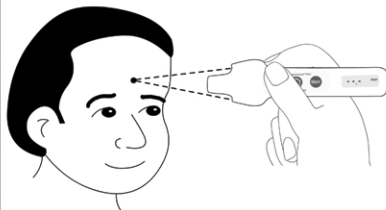

注意

- A. 適正に使用するために、また、正確な計測を行うために、必ず正しい持ち方でご使用下さい。

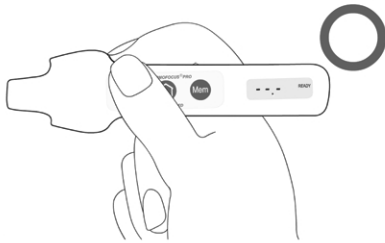

- B. 本体を落としたり、本体に衝撃を与えないよう注意して下さい。
体温計内部の部品に障害を与え、校正に影響を与える原因となります。

